

Adapt Hautschutzringe plan

Allgemeine Informationen

- Hautschutzringe werden verwendet, um Unebenheiten der stoma-umgebenden Haut abzudichten und somit eine plane Grundlage zum Anbringen der Stomaversorgung zu schaffen.
- Die zusätzliche Verwendung von Hautschutzringen kann helfen, eine Unterwanderung des Stomaversorgungssystems durch Ausscheidungen zu vermeiden.
- Die Hautschutzringe können zugeschnitten, geformt und miteinander kombiniert werden, um die Stomaversorgung an individuelle Bedürfnisse anzupassen.

Verwendung der planen Adapt Hautschutzringe

1. Bitte achten Sie darauf, den Hautschutz nur auf saubere, trockene Haut ohne Fett- und Seifenrückstände aufzubringen.
2. Schneiden Sie die Stomaversorgung auf die Stomagröße zu.
3. Nehmen Sie den Hautschutzring aus der Umverpackung (Abbildung 1) und entfernen anschließend die Abziehfolien von beiden Seiten (Abbildung 2).
4. Passen Sie den Hautschutzring durch Dehnen und Formen der Stomaform bzw. -größe an (Abbildung 3).
5. Bringen Sie den Hautschutzring an der bereits ausgeschnittenen Öffnung des Stomaversorgungssystems an (Abbildung 4).
6. Falls es notwendig ist, können Sie mehrere Hautschutzringe miteinander kombinieren (Abbildung 5).
7. Bringen Sie die Versorgung nun wie gewohnt an.

Grundsätzlich gilt immer:

Geschädigte Haut sollte in jedem Fall von einem Arzt oder einer Fachkraft begutachtet werden, um die Ursache für die Irritation oder Reizung zu bestimmen und diese behandeln zu können.



Abbildung 1:
Hautschutzring aus der Umverpackung nehmen



Abbildung 2:
Abziehfolien von beiden Seiten entfernen



Abbildung 3:
Dehnen und formen



Abbildung 4:
Hautschutzring anbringen



Abbildung 5:
Kombination mehrerer Hautschutzringe

Häufig gestellte Fragen

Woher weiß ich, welche Ringgröße ich verwenden soll?

Wählen Sie die Ringgröße, die der Stomagröße am nächsten kommt. Die Adapt Hautschutzringe können in beliebige Formen modelliert werden.

Ringgröße 48 mm – Bestell-Nr. 7805
Ringgröße 98 mm – Bestell-Nr. 7806



Was ist, wenn der Ring für das Stoma zu groß ist?

Man kann aus dem Hautschutzring ein Stück ausschneiden und die Enden wieder miteinander verbinden, um einen kleineren Ringdurchmesser zu erhalten.

Das Stoma ist nicht rund. Kann ich trotzdem die Hautschutzringe verwenden?

Ja. Die Adapt Hautschutzringe können durch Dehnen oder Formen an die Form des Stomas angepasst werden.

Wie werden die Adapt Hautschutzringe entfernt?

Der Hautschutzring wird zusammen mit der Stomaversorgung entfernt. Sollten Rückstände auf der Haut verbleiben, reiben Sie diese sanft von der Haut.

Können die Adapt Hautschutzringe auch bei Irritationen der Haut eingesetzt werden?

Ja. Die planen Adapt Hautschutzringe sind alkoholfrei und verursachen keine Reizung der Haut.

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung für Betroffene:
Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

Beratung für Fachpersonal:
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 89/99 28 86-122
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr,
Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: beratungsteam@hollister.com
www.hollister.de

Österreich

Hollister GmbH
Heinrich-Collin-Str. 1
A-1140 Wien

Beratung:
Telefon: 0 800/80 81 88 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 01/8 77 08 00-0
Telefax: 01/8 77 08 00-22
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr,
Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com
www.hollister.at

Schweiz

Hollister
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 044/730 45 05
Telefax: 044/730 54 44
Mo.–Do.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr
Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr

E-Mail: info@hollister.ch
www.hollister.ch