

Post-OP-Produkte

Conform 2
Moderma Flex

Ein- und zweiteilige Post-OP-Versorgung



Ob steril oder unsteril, die richtige Wahl von Anfang an

Conform 2 Post-OP-Produkte – zweiteilige Stomaversorgung für Kolostomie, Ileostomie und Urostomie



Komfort

- Körperseitige Vliesbeschichtung
- Vorderseite mit klarer Folie zur besseren Stuhlkontrolle

Weicher Auslass

- Integrierter, weicher Auslass mit fixierbarem Stopfen

Rücklaufsperr

- Verhindert Rückfluss des Urins

Großvolumiges Ventil

- Sichert den ungehinderten Ablauf selbst bei Schleimbeimengungen

Sicherheit von Anfang an

- FlexWear Hautschutzmixtur für hohe Feuchtigkeitsresistenz
- Untergreifbarer Rastring
- Zentrumverschluss für sicheren Halt bei flachem Design
- Wahlweise mit durchgehendem Hautschutz oder plus integriertem, atmungsaktivem Hafrand

Moderma Flex Post-OP-Produkte – einteilige Stomaversorgung für Kolostomie und Ileostomie



Sicher bei maximaler Flexibilität

- FlexWear Hautschutzmixtur für hohe Feuchtigkeitsresistenz und optimale Tragezeit
- Mit zwei verschiedenen Durchmessern (ausschneidbar bis 70 mm oder 110 mm) – auch für doppelläufige Stomata geeignet
- Durchgehender Hautschutz ohne Vorstanzung für individuelles Zuschneiden

Komfort

- Körperseitige Vliesbeschichtung
- Vorderseite mit klarer Folie zur besseren Stuhlkontrolle

Einfache Kontrolle

- Fenster zur einfachen Inspektion des Stomas

Weicher Auslass

- Integrierter, weicher Auslass mit fixierbarem Stopfen

Hollister Stomaversorgung.
Auf die Details kommt es an.

 Hollister

Ob Conform 2 oder Moderma Flex – beide Systeme bieten ...



... einen flexiblen Auslass:

- Integrierter Auslass zum Anschluss eines Nacht- oder Bettbeutels



... intelligente Lösungen:


- Bei Bedarf kann der Auslass abgeschnitten und mit einer Klammer verschlossen werden



... durchdachte Details:

- Post-OP-Beutel bieten genügend Platz zum Anbringen einer Fixierhalterung, um z. B. Katheter auszuleiten

Umfassendes Sortiment

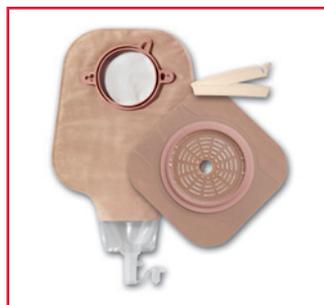

Die Conform 2 und Moderma Flex Post-OP-Produkte sind als sterile Sets oder als nicht sterile Einzelprodukte in verschiedenen Größen erhältlich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, und Sie möchten mehr über unsere Produkte erfahren?

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, und selbst dann, wenn Sie einfach nur neugierig sein möchten. Sie erreichen uns telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0 800/1 01 50 23 (Mo.–Do.: 9.00–17.00 Uhr, Fr.: 9.00–14.00 Uhr) oder per E-Mail unter der Adresse hollister.deutschland@hollister.com. Unser kompetentes Beratungsteam ist gerne für Sie da!

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung für Betroffene:

Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

Beratung für Fachpersonal:

Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

Bestellung:

Telefon: 0 89/99 28 86-122

Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei

Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: hollister.deutschland@hollister.com

www.hollister.de

Österreich

Hollister GmbH
Heinrich Collin-Straße 1
A-1140 Wien

Beratung:

Telefon: 0 800/80 81 88 – gebührenfrei

Telefax: 01/8 77 08 00-22

Bestellung:

Telefon: 01/8 77 08 00-0

Telefax: 01/8 77 08 00-22

Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

www.hollister.at

Schweiz

Hollister
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:

Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung:

Telefon: 044/730 45-05

Telefax: 044/730 54-44

Mo.–Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr

E-Mail: info@hollister.ch