

# Infyna Chic

## Gebrauchsfertige hydrophile intermittierende Einmalkatheter

Gebrauchsanweisung  
für die Frau



Infyna Chic  
Einmalkatheter

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

#### Warnhinweise:

Um dem Infektionsrisiko oder anderen Komplikationen vorzubeugen, darf dasselbe Produkt nicht mehrmals verwendet werden.

Sollten Beschwerden oder Zeichen einer Traumatisierung der Harnröhre auftreten, brechen Sie den Gebrauch bitte umgehend ab und suchen Sie einen Arzt auf.

#### Vorsichtsmaßnahmen:

Wenn eine der folgenden Indikationen auftritt, suchen Sie bitte vor Gebrauch dieses Produktes den Arzt auf:

- Harnröhrenriss
- Ungeklärte Blutung aus der Harnröhre
- Ausgeprägte Harnröhrenstriktur
- Via falsa
- Urethritis - Entzündung der Harnröhrenschleimhaut

#### Vorsichtsmaßnahmen:

Selbstkatheterismus sollte dem Behandlungsplan und der Empfehlung Ihres Arztes folgen und in Übereinstimmung mit der gegebenen Gebrauchsanleitung durchgeführt werden. Da die Häufigkeit der Katheterisierung bei jeder Person anders ist, sollte Ihr Arzt eine Empfehlung über die Häufigkeit Ihrer Katheterisierung abgeben. Sollten Sie andere Fragen zu Ihrer Katheterisierung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

Bitte beachten Sie: Lagern Sie alle Katheterboxen in horizontaler Lage bei normaler Raumtemperatur.

#### Hollister GmbH

Bergmillergasse 5/1/1  
A-1140 Wien

#### Kundenservice:

Telefon: 01/877 0 800  
Montag – Donnerstag: 8:00 – 16:00 Uhr  
Freitag: 8:00 – 14:00 Uhr

#### Bestellung:

E-Mail: [hollister.oesterreich@hollister.com](mailto:hollister.oesterreich@hollister.com)  
Fax: 01/877 0800-22

[www.hollister.at](http://www.hollister.at)

Hollister und Logo sowie Infyna Chic sind  
Warenzeichen von Hollister Incorporated.

© 2019: Hollister Incorporated.



1. Legen Sie alle Materialien bereit, die Sie für das Katheterisieren benötigen.
2. Waschen Sie Ihre Hände wie von Ihrem Arzt empfohlen.
3. Nehmen Sie Ihre Position für die Durchführung der intermittierenden Katheterisierung ein. Öffnen Sie Ihre Kleidung so weit, dass Sie gut an Ihre Genitalien herankommen.
4. Spreizen Sie die Schamlippen mit zwei Fingern Ihrer nicht dominanten Hand. Reinigen Sie wie von Ihrem Arzt empfohlen mit Ihrer dominanten Hand den Bereich um die Harnröhre und die Genitalien.



5. Klappen Sie die Kappe mit Ihrer dominanten Hand auf, um das Siegel zu brechen und die Verpackung zu öffnen. Lassen Sie den Katheter in der geöffneten Verpackung. **HINWEIS:** Verwenden Sie den Katheter nicht mehr, wenn die Versiegelung bereits beschädigt ist. Bei Verwendung eines Auffangbeutels (nicht im Lieferumfang enthalten) wird dieser am Konnektorende des Katheters befestigt. Der Katheter muss dafür nicht aus der Verpackung genommen werden.
6. Nehmen Sie die Verpackung in Ihre nicht dominante Hand und entnehmen Sie den Katheter mit der dominanten Hand. Berühren Sie dabei nur den Konnektor.



7. Zum Katheterisieren spreizen Sie die Schamlippen mit zwei Fingern Ihrer nicht dominanten Hand und führen Sie den Katheter mit Ihrer dominanten Hand sanft in die Harnröhre ein bis der Urin zu fließen beginnt.
8. Sobald der Urinfluss stoppt, ziehen Sie den Katheter langsam heraus. Sollte erneut Urin fließen, warten Sie bis auch der restliche Urin abgeflossen ist. Sobald Sie sicher sind, dass Ihre Blase leer ist, ziehen Sie den Katheter vollständig heraus.



9. Schieben Sie den Katheter zur Entsorgung zurück in die Verpackung und schließen Sie den Klappverschluss. Sie können diesen entweder sofort oder bei Bedarf auch später in einem Abfalleimer entsorgen. **ENTSORGEN SIE IHN NICHT IN DER TOILETTE.**
10. Waschen Sie sich abschließend die Hände.