

Conform 2 mit FormaFlex Hautschutzplatte
**Zweiteilige Stomaversorgung
Für eine leichte Handhabung**

Vorbereiten des Versorgungswechsels



Legen Sie sich Ihren Beutel, Ihre Basisplatte, einen Entsorgungsbeutel und Materialien zur Reinigung der Haut bereit.

Vorbereiten der Basisplatte



1 Entfernen Sie die durchsichtige Abziehfolie auf der Rückseite der Basisplatte.



2 Dehnen Sie die Hautschutzplatte von der Mitte ausgehend auf die annähernde Größe und Form des Stomas.



Entfernen der Versorgung



3 Halten Sie den umliegenden Hautbereich fest. Lösen Sie die Hautschutzplatte beginnend am oberen Rand vorsichtig von der Haut und ziehen Sie diese langsam von oben nach unten ab. Verpacken Sie die gebrauchten Produkte in einen Entsorgungsbeutel und entsorgen Sie ihn in den Hausmüll. Werfen Sie die gebrauchte Versorgung nicht in die Toilette.

Reinigen/Trocknen der Haut



4 Reinigen Sie die Haut um das Stoma gründlich mit Wasser und einer milden, pH-neutralen Seife. Waschen und trocknen Sie die Haut gründlich. Achten Sie darauf, die Versorgung nur auf saubere, trockene Haut ohne Fett- und Seifenrückstände aufzubringen.

Anbringen der Basisplatte



5 Zentrieren Sie die Öffnung der Basisplatte genau über dem Stoma und drücken Sie den Hautschutz rund um das Stoma auf der Haut an.



6 Formen Sie das Hautschutzmaterial um das Stoma an. Achten Sie darauf, dass der Hautschutz das Stoma umschließt und keine Hautstellen dabei unbedeckt bleiben.



7 Entfernen Sie nun die Streifen des Abziehapiers und streichen Sie den Hafttrand rundherum auf der Haut an.



8 Nehmen Sie den Beutel in die Hand und fassen Sie mit dem Daumen unter den Rastring der Basisplatte. Legen Sie die untere Kante des Beutelrings auf den unteren Teil des Rastrings an der Basisplatte und drücken Sie beide Teile von unten beginnend zusammen, bis sie vollständig eingerastet sind.



9 Wärmen Sie die Versorgung mit den Händen für ca. 30-45 Sekunden an, um die Haftung der Hautschutzplatte zu unterstützen.



10 Wenn Sie einen Ausstreibeutel an der Basisplatte verwenden, schließen Sie den Auslass mit dem **Lock 'n Roll** Verschluss oder bringen Sie die Klammer an.



Ablaufventil

Wenn Sie einen Urostomiebeutel verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Ablaufventil geschlossen ist. Wenn der Beutel angebracht ist, darf der am Ventil abgebildete „Tropfen“ nicht sichtbar sein. Bringen Sie abschließend die mitgelieferte Kappe an, wenn Sie es wünschen.

Conform 2 FormaFlex

Basisplatte plus Hafrand

HMV: 29.26.05.0xxx^{1*}

HMV: 29.26.05.1xxx^{2*}



- Formbares, erosionsbeständiges Hautschutzmaterial zur individuellen Anpassung an Stomagröße und -form



- Mit flexiblem, atmungsaktiven Hafrand für mehr Sicherheit

- Untergreifbarer Rastring

- Zentrumverschluss

Stoma in mm	RR Ø in mm/ Farbcode	Bestell-Nr.	Pharma-Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
16-32	45 ●	34700 ¹	8440218	5
16-43	55 ●	35700 ¹	8440224	5
16-57	70 ●	37700 ²	8440230	5

* Die Aufnahme dieser Produkte in das Hilfsmittelverzeichnis wurde beantragt.

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung für Betroffene:
Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

Beratung für Fachpersonal:
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 89/99 28 86-122
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr
E-Mail: hollister.deutschland@hollister.com

www.hollister.de

Österreich

Hollister GmbH
Heinrich Collin-Straße 1
A-1140 Wien

Beratung:
Telefon: 0 800/80 81 88 – gebührenfrei
Telefax: 01/8 77 08 00-22

Bestellung:
Telefon: 01/8 77 08 00-0
Telefax: 01/8 77 08 00-22
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr
E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

www.hollister.at

Schweiz

Hollister
Bernstraße 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 044/730 45 05
Telefax: 044/730 54 44
Mo.–Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr
E-Mail: info@hollister.ch