


Gebrauchsanweisung für Pouchkins

Einteiliges Stomaversorgungssystem für die Kinderversorgung

Vor der Versorgung


1

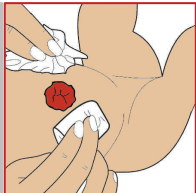

Stellen Sie sicher, dass die Haut um das Stoma sauber und trocken ist. Keine Öle, Babypuder oder rückfettende Lotionen verwenden, die die Haftung der Hautschutzplatte beeinträchtigen.


Ausschneiden des Hautschutzes

2

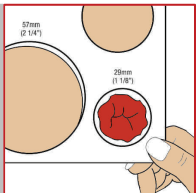


Messen Sie die Stomagröße genau ab. Eine passend zugeschnittene Stomaversorgung schützt die Haut zuverlässig vor Irritationen.

3

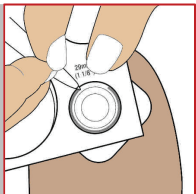


Zeichnen Sie den Stomadurchmesser auf der Abziehfolie/dem Abziehpapier der Hautschutzplatte an.

4

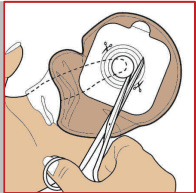

Schneiden Sie nicht über den auf der Abziehfolie/dem Abziehpapier aufgedruckten äußersten Kreis hinaus.


5

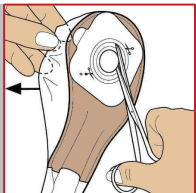

Geben Sie acht, dass die Beutelfolie nicht durchstoßen wird.


Verschließen des Ausstreifbeutels mit integriertem Lock´n Roll Verschluss

6

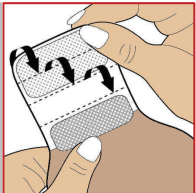

Falten Sie den Auslass in Richtung der Beutelvorderseite.


7

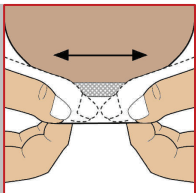


Drücken Sie die Verschlussstreifen aufeinander, bis Sie das Verschließen des Beutels spüren.

Verschließen des Urostomiebeutels

8

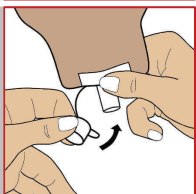


Setzen Sie die Kappe auf den Auslass des Urostomiebeutels.

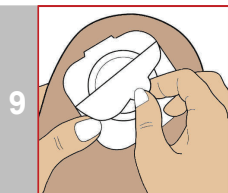


Anbringen des Beutels

Entfernen Sie die Abziehfolie/das Abziehpapier von der Hautschutzplatte.

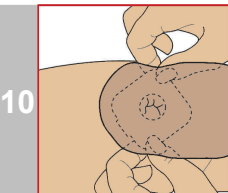


Legen Sie die Öffnung der Hautschutzplatte genau über dem Stoma an und drücken Sie den Hautschutz von unterhalb des Stomas beginnend auf die Haut.

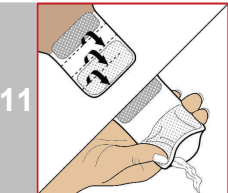


Entleeren des Ausstreifbeutels mit integriertem Lock´n Roll Verschluss

Öffnen Sie den Beutelverschluss und falten Sie ihn auf. Fassen Sie an beide Seiten des Auslasses und drücken Sie diese gegeneinander, um den Beutel zu öffnen. Die Innenseiten des Beutelauslasses können nun gereinigt werden. Verschließen Sie den Beutel wieder gemäß Abbildung 6 und 7.

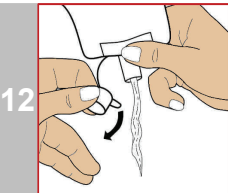


Entleeren des Urostomiebeutels

Nehmen Sie die Kappe am Auslass des Urostomiebeutels ab. Entleeren Sie den Beutel und setzen Sie die Kappe wieder auf.

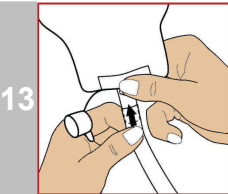


Anschluss an einen Nacht- oder Bettbeutel

Entfernen Sie die Kappe und entleeren Sie den Beutel. In jeder Box sind Urostomie-Abflussadapter mitgeliefert. Diesen drücken Sie auf das Ablaufventil des Urostomiebeutels, bis der Adapter einschnappt. Verbinden Sie nun den Schlauch des Nacht- oder Bettbeutels mit dem Adapter.

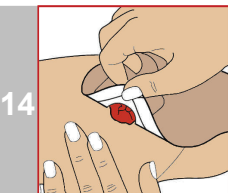

Entfernen des Beutels

Halten Sie den umliegenden Hautbereich fest. Lösen Sie die Hautschutzplatte von oben beginnend vorsichtig von der Haut und ziehen Sie diese langsam von oben nach unten ab. Reinigen und trocknen Sie die Haut um das Stoma sorgfältig, bevor Sie eine neue Versorgung anlegen.

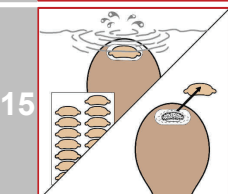

Verwendung von Filterabdeckblättchen

Beim Schwimmen oder Baden kann mit den beiliegenden Filterabdeckblättchen der Filter zusätzlich verschlossen werden. Anschließend entfernen Sie dieses wieder.

Vermeiden Sie eine Überfüllung des Beutels. Entleeren Sie ihn, wenn er zu einem Drittel gefüllt ist. Werfen Sie den Beutel nicht in die Toilette.

Deutschland
Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung zur Kinderversorgung:
Telefon: 0 800/5 60 07 59 – gebührenfrei

Beratung für Fachpersonal:
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 89/99 28 86-122
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei
Mo.-Do.: 8.00-17.00 Uhr, Fr.: 8.00-14.00 Uhr
E-Mail: hollister.deutschland@hollister.com

Österreich
Hollister GmbH
Heinrich Collin-Str. 1
A-1140 Wien

Beratung:
Telefon: 0 800/80 81 88 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 01/8 77 08 00-0
Telefax: 01/8 77 08 00-22
Mo.-Do.: 8.00-16.00 Uhr, Fr.: 8.00-14.00 Uhr
E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

Schweiz
Hollister
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 44/7 30 45-05
Telefax: 0 44/7 30 54-44
Mo.-Fr.: 8.00-12.00 Uhr, 13.00-16.00 Uhr
E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.de